

## «УРОКС»

вязкоэластичный протектор слизистой оболочки мочевого пузыря, 50 мл

Инструкция по применению.

Медицинское изделие «УРОКС» применяется для инстилляции в мочевой пузырь и является вязкоэластичным протектором межклеточного вещества уротелия мочевого пузыря, уретры. Выступает временной защитой слизистой оболочки мочевого пузыря при различного рода манипуляциях (уретро-цистоскопия, лучевая терапия и т.д.).

### Основные технические характеристики

«УРОКС» - стерильный, апиrogenный, прозрачный, упруговязкий буферизованный физиологический раствор гиалуроната натрия неживотного происхождения (рН 6,8 - 7,6). Поставляется в стеклянном герметично закрытом флаконе, в стерильном виде и предназначен только для инстилляций мочевого пузыря.

### Состав

#### 1 мл раствора содержит:

- гиалуроновая кислота 0,8 мг
- натрия дигидрофосфат моногидрат 0,45 мг
- динатрия фосфат безводный 2 мг
- натрия хлорид 8,5 мг±0,05
- вода деионизированная q.s.

### Механизм действия препарата

Гиалуроновая кислота, является высокомолекулярным гликозаминогликаном, который состоит из повторяющихся дисахаридов N-ацетилглюкозамина и глюкуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота входит в состав всех тканей организма и является наиболее значимым компонентом межклеточного матрикса и составляет при этом существенную долю гликозаминогликанов уротелия мочевого пузыря, уретры (мочеспускательного канала).

Изделие медицинского назначения «УРОКС» является вязкоэластичным протектором межклеточного вещества уротелия мочевого пузыря, уретры. При введении в полость мочевого пузыря создаёт вязкоэластичную плёнку на поверхности слизистой оболочки, защищающую ее от внешних воздействий при различного рода манипуляциях (уретроскопия, цистоскопия, ТУР предстательной железы и мочевого пузыря, лучевая терапия органов малого таза и т.д.).

### Показания к применению

Временная защита слизистой оболочки мочевого пузыря при различного рода манипуляциях (уретро-цистоскопия, лучевая терапия и т.д.).

### Противопоказания к применению

«УРОКС» не следует применять в следующих случаях:

- Пациентам с повышенной чувствительностью к одному из компонентов состава.
- Беременным женщинам, кормящим матерям и детям.

### Возможные побочные дефекты

Побочные явления не выявлены. Может наблюдаться индивидуальная непереносимость.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучена эффективность и безопасность применения «УРОКС» в сочетании с одновременным введением лекарственных средств в мочевой пузырь.

Отмечена несовместимость между гиалуронатом натрия и четвертичными солями аммония, такими как бензалкония хлорид. Не следует допускать контакт «УРОКС» с такими препаратами или с медицинскими и хирургическими инструментами, обработанными такими препаратами.

Выполняйте требования инструкции по применению.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С

Содержимое шприца стерильно.

Беречь от света.

В случае нарушения целостности упаковки - использовать запрещено.

Для однократного применения.

### Способ применения

Перед началом введения раствора «УРОКС» производится катетеризация мочевого пузыря уретральным катетером (Фолея, Нелатона), эвакуируется остаточная моча. После чего, по катетеру, раствор медленно вводится непосредственно в мочевой пузырь с экспозицией не менее 30 минут.

Рекомендуется производить инстилляцию мочевого пузыря непосредственно перед инвазивными манипуляциями на мочевом пузыре, уретре (уретро- и цистоскопия, ТУР-мочевого пузыря, предстательной железы, лучевая терапия органов малого таза и т.д.).

«УРОКС» предназначен для инстилляции в мочевой пузырь, которые должен выполнять врач, имеющий специальную подготовку, в специально оборудованном помещении, с соблюдением всех правил асептики.

- Перед введением препарата, пациента следует ознакомить с показаниями и противопоказаниями к применению.
- При хранении в холодильнике флакон следует достать не менее, чем за 20 минут до применения. Перед применением температура флакона должна быть не менее 20 °С.
- Перед введением препарата «УРОКС», следует опорожнить мочевой пузырь.
- Препарат «УРОКС» вводится в полость мочевого пузыря с помощью урологического катетера на срок не менее 30 минут.

Меры предосторожности:

- Препарат «УРОКС» предназначен только для введения в полость мочевого пузыря с помощью урологического катетера.
- Выполняйте введение, строго соблюдая правила асептики.
- Перед использованием проверяйте целостность и герметичность флакона: не используйте препарат, если флакон или его крышка повреждены, а также проверяйте целостность упаковки шприца, иглы и урологического катетера. При их повреждении применение препарата не допустимо.
- Не используйте после истечения срока годности, помещения, с соблюдением всех правил асептики.

### ФОРМА ПОСТАВКИ Комплектация:

1. Флакон с материалом, объемом 50 мл.
2. Шприц трехкомпонентный инъекционный однократного применения с иглой и без иглы типа "Луер" и "Луер-Лок", стерильный объемом 50 мл.
3. Катетер урологический.
4. Инструкция по применению.
5. Коробка потребительская.

### Условия хранения

- Хранение при температуре от +5 °С до +25 °С.
- Предохранять от солнечного света.
- Не замораживать.

**Внимание: Категорически запрещено использовать материал при нарушении целостности и герметичности флакона, упаковки шприца, иглы и урологического катетера: Введение препарата «УРОКС» должно проводиться только врачом в медицинском учреждении, в асептических условиях процедурного кабинета.**

**ООО «РусВиск» не несёт ответственности за последствия неправильного использования препарата «УРОКС».**

Регистрационное удостоверение № .....

Декларация о соответствии .....

Производитель: ООО «РусВиск»

Юридический адрес: Россия, .....

Место производства медицинского изделия: ООО «Русвиск» . Россия, 142280, Московская область, г. Протвино , ул. Железнодорожная , д. 3.